

# ergoflix

Mode d'emploi

## Rampes télescopiques



ergoflix.fr

Les rampes télescopiques ergoflix sont fabriquées en aluminium robuste et se déplient et se replient facilement. Grâce à leur faible poids, les rampes sont faciles à manipuler et peuvent être rangées de manière compacte une fois repliées. Les rampes sont dotées d'une surface antidérapante et texturée, ce qui garantit une bonne prise en main.



## Dimensions et poids

Dimensions (environs)	Fermée	Ouverte
Longueur	910 mm	1520 mm
Largeur	190 mm	190 mm
Hauteur	50 mm	50 mm
Poids	Une rampe	Les deux rampes
En kilogramme	3,9 kg	7,8 kg
Capacité de charge	Les deux rampes	
En kilogramme	300 kg	

## Mise en service des rampes



**AVERTISSEMENT** Risque de blessure en cas d'utilisation non conforme à l'usage prévu

Le chargement du fauteuil roulant non conforme peut présenter des risques de basculement et de chute de l'appareil. Pour éviter cela, respectez les consignes suivantes :

- Ne dépassez jamais la charge maximale de vos rampes.
- Ne chargez le fauteuil roulant à l'aide des rampes que si vous maîtrisez parfaitement l'appareil.
- Soyez toujours prudent lors du chargement et du déchargement du fauteuil roulant.
- Ne vous placez jamais sur le chemin d'un appareil ou d'un véhicule. Faites attention aux autres personnes et aux enfants dans l'environnement immédiat.
- Ne laissez pas les rampes d'accès sans surveillance.

- Ne chargez et ne déchargez que sur une surface stable et plate.
- Les surfaces et les bords inférieurs des rampes ont moins d'adhérence lorsqu'ils sont mouillés.
- Soyez particulièrement attentif et prudent.
- N'utilisez les rampes que pour l'usage auquel elles sont destinées.

### **Respectez les points suivants lors du chargement :**

1. Garez la voiture ou la camionnette sur une surface solide avant de la charger. et bloquez le véhicule pour l'empêcher de rouler.
2. Posez les rampes sur le sol de manière à ce qu'elles ne glissent pas.
3. Assurez-vous que les rampes sont propres et non endommagées.
4. Assurez-vous que la rampe est nettement plus large que le fauteuil roulant.
5. Placez le fauteuil roulant avec la roue avant vers l'avant en direction de la rampe. Poussez ou conduisez le fauteuil roulant (à l'aide du moteur électrique) lentement et régulièrement sur la rampe, en veillant à ce que les roues suivent le milieu de la rampe.
6. Montez la rampe à la vitesse la plus basse possible.
7. Montez la rampe sans vous arrêter pour éviter de reculer.
8. Faites en sorte d'avoir une zone de marche à vide suffisamment grande pour que le fauteuil roulant puisse, en cas d'accident, se déplacer sur une courte distance. La rampe doit pouvoir rouler vers le bas sur une courte distance en cas d'interruption de la course.



## **Maintenance**

Il est de la responsabilité de l'utilisateur d'inspecter la rampe de chargement et ses composants avant chaque utilisation.

Si la rampe est endommagée, elle ne doit pas être utilisée.

Vous pouvez entretenir la rampe en la nettoyant régulièrement.

Adresse postale

**ergoflix France SAS**

35 rue Saint Simon, 69009 Lyon

Tél. +33-(0)4 51 08 92 00

info@ergoflix.fr, www.ergoflix.fr

**Horaires d'ouverture :**

Du lundi au vendredi

de 9h à 12h30 et de 13h30 à 18h

Siège social

**ergoflix Group**

Marktstr. 20, 46499 Hamminkeln

Tel. +49 28 52 9 45 90-00, Fax. +49 28 52 9 45 90-99

info@ergoflix.de, www.ergoflix.de

**Horaires d'ouverture :**

Du lundi au vendredi

de 8h30 à 18h

Rejoignez-nous sur les réseaux sociaux :



**Fabricant :**

Anhui JBH Medical Apparatus Co., Ltd.

No. 116 Qicang Road, Mingguang, Chuzhou

Anhui Province, Anhui, 239400

CHINA



SUNGO Europe B.V., Olympisch Stadion 24,

1076DE Amsterdam,

Netherlands

**Version :** 001 - septembre 2022 | **Mentions légales :** Nous nous dégageons de toute responsabilité en cas d'erreur d'impression.

Sous réserve d'éventuelles erreurs. Les éventuelles variations de couleurs sont dues aux procédés d'impression utilisés. Toutes les dimensions indiquées sont des valeurs approximatives.

Les articles sont fournis sans décoration.